

Protac couverture à balles™

- effet rééquilibrant et tranquillisant

La couverture à balles est utilisée dans les cas suivants:

TDAH
Anxiété
Anorexie
Apoplexie
Autisme
Ataxie
Paralysie cérébrale
Troubles du sommeil
Démence
Dépression
Troubles du développement moteur
Epilepsie
Les bébés prématurés
Handicap mental
Domages au cerveau
Maladie de Huntington
Hyper- et hypoactivité
Troubles de la concentration
Polyhandicapées
Abus
Sclérose en plaques
Les troubles obsessionnels compulsifs
Parkinson
Psychoses
Troubles de la perception
Trouble de l'intégration sensorielle
Schizophrénie
Douleurs
Spasticité
Stress
Surdicécité
Syndrome de la Tourette

La couverture à balles stimule les sens, en particulier la sensibilité superficielle et profonde, et aide à la prise de conscience corporelle. Le principe de fonctionnement de cette couverture à balles consiste que la pression ponctuelle du poids des balles sur le corps ainsi que la sensation du toucher, mais aussi les sensations des muscles et des articulations sont stimulés. Les nombreuses expériences sensorielles envoient des informations inhibitrices au système nerveux central. Cela intensifie la perception du corps et de ses limites et crée un sentiment de sécurité. Pour cette raison la couverture à balles a en effet calmant.

La couverture à balles offre de nombreuses possibilités d'application pour toutes les personnes avec la conscience du corps réduite, l'agitation physique et mentale. Elle peut être utilisée comme une couette de lit standard. Bon nombre de personnes l'utilise également durant la journée pour de courtes périodes de relaxation. On peut par exemple se coucher ou s'asseoir dessus, ou encore s'enrouler dedans. La couverture à balles est un moyen puissant pour initier et à maintenir l'endormissement des enfants des adolescents et des adultes.


Stimuler par le jeu

Les enfants aiment particulièrement s'amuser avec la couverture. Ils peuvent s'y cacher, construire une cachette ou se rouler dedans. La stimulation par les balles apporte la tranquillité et augmente l'attention de l'enfant. Une capacité de concentration plus élevée améliore l'effet de l'entraînement sensoriel moteur et facilite l'apprentissage.

Durée d'application

La durée d'application dépend à la fois sur le besoin de stimulation sensorielle et de l'intensité d'une stimulation sensorielle. Celui ou celle qui éprouve une sensation de plaisir au contact de la couverture à balles arrive rapidement à une sensation de sérénité au travers du contact stimulant des balles. De nombreux utilisateurs dorment chaque nuit avec la couverture à balles, tandis que d'autres l'utilisent, selon leurs besoins, pour retrouver leur sérénité.



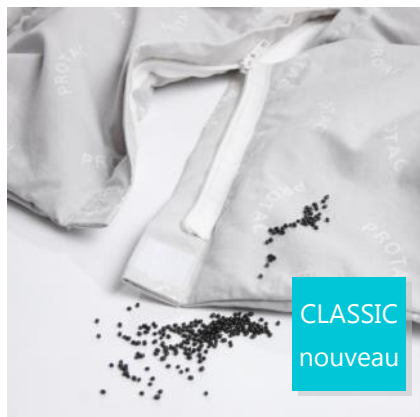

Protac Couverture à balle™ Classic

Dans la série Classic, la fameuse Protac couverture à balle est maintenant équipée de petite billes/granulés en plastique encore plus silencieuses. Avec ses granulés répartis dans 40 compartiments, cette couverture qui convient particulièrement aux patients souffrant de douleurs et de démence représente une nouveauté. Ils entourent fermement le corps, ce qui confère un sentiment de sécurité.

On peut séparer la couverture en deux parties et la laver dans toutes machines en usage dans le commerce.



Protac Couverture à balle™ Flexible

Comme la série Classic, la couverture de la série Flexible contient des balles mobiles. Ces modèles sont cependant équipés de compartiments dont les sacs contenant les balles sont amovibles. Il est ainsi possible de mettre en place de façon individuelle sa couverture à balle selon le degré de stimulation souhaitée. Les sacs à balles et les housses sont lavables dans toutes machines en usage dans le commerce. La série Flexible est disponible en plusieurs modèles avec des balles, des tailles et des poids différents. Par exemple, un mélange avec des balles en plastique et des billes en polypropylène.



Protac Couverture à balle™ Calm

Il s'agit ici d'une nouvelle série de couverture à effet apaisant qui se distingue par un mouvement réduit des balles. Les modèles comportent plusieurs gaines surpiquées remplies de balles. Le type de stimulation se distingue ainsi de celui des autres séries. Roulée, la couverture ne prend pas plus de place qu'un petit sac de voyage et ainsi facile à transporter. La couverture pour adultes peut se séparer en deux parties et se laver dans toutes machines en usage dans le commerce. La série Calm est disponible en plusieurs modèles avec des tailles et des poids différents.

Couvertures à balles, remplis uniquement avec les balles Ø 50 mm, donnent la plus grande sévérité et la stimulation maximale. Elle est utilisée chez des personnes qui ont besoin d'une stimulation sensorielle intense, par ex. chez l'autisme, maladie mentale, l'enfant atteint de TDAH ou les maladies neurologiques.

La couverture remplie exclusivement avec des billes/granulés en polypropylène est la variante la plus légère pour ceux qui ont besoin d'une stimulation tactile moins puissante.

Accessoires

- Protac housse de protection imperméable /incontinence pour la couverture à balles.
- Protac housse avec la doublure en Thinsulate. Le côté ouatiné réduit la stimulation tactile des balles.
- Protac housse de couette et taie en satin de coton, avec fermeture éclair pratique sur deux côtés.
- Sac de transport pour la couverture en nylon imperméable.

