

Reinigungsempfehlung Protac Kugeldecke®

- Sämtliche Decken können bis max. 60° gewaschen werden.
- Waschmittel ohne Bleichmittel verwenden (z. B. Color-Waschmittel).
- Schonendes Schleudern: Schleuderdrehzahl der Waschmaschine auf ein Minimum einstellen, um unnötige Reibung zwischen Stoff und die Kugeln zu vermeiden.
- Schonend trocknen: Trocknen an der Luft anstatt im Wäschetrockner.
Vorteile: Die Kugeldecken haben so eine längere Lebensdauer und wir sparen Energie.
- Es wird empfohlen, die Decke regelmässig zum Lüften aufzuhängen.

Intervalle und Bedarf für die Wäsche hängen von Anwendung und Gebrauch ab. Bei Reinigung und Pflege der Kugeldecke ist die unten stehende Anleitung zu befolgen.

Protac Kugeldecke® Granulat und Calm

Kugeldecken mit den Artikelnummern 119-129, 401-402, 301-302 sind in drei Teile trennbar und in einer Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 7 Kg gewaschen werden. Der mitgelieferte Wäschesack sollte verwendet werden.

Protac Kugeldecke® Flexible und Combi

Kugeldecken mit den Artikelnummern 201, 202, 205, 206 haben herausnehmbare Beutel, die einzeln in einer Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 7 kg gewaschen werden können. Bezug und Beutel werden separat gewaschen. Wenn Sie eine Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 16 kg haben, können Sie die Decke komplett waschen.

Protac Kugeldecke® Classic

Kugeldecken mit den Artikelnummern 101, 102, 105, 106, 109, 110 können in einer Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 16 kg gewaschen werden.

Protac Kugeldecke® Prämatüre / Frühgeborene und Baby

Kugeldecken mit der Artikelnummer 107 Baby können in einer Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 7 kg gewaschen werden.

Fleckentfernung, Desinfektion

Wenn Sie bei der Entfernung von Flecken Fleckentfernungsmittel verwenden wollen, versuchen Sie dies zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle, um festzustellen, ob der Stoff Schaden nimmt oder Farbveränderungen auftreten. Protac empfiehlt, keine Fleckentfernungsmittel zu verwenden. Kontaktieren Sie uns gern, falls Sie Fragen bezüglich geeigneter Mittel für Fleckenentfernung oder Desinfektionsmittel haben.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.