

Conseils pour le nettoyage et l'entretien de la Protac Ball Blanket®

- Toutes les couvertures peuvent être lavées jusqu'à 60° au maximum
- Utilisez une lessive sans agent de blanchiment comme Ariel Liquide/Gel (couleurs claires).
(Les balles en plastique EVA ne sont pas résistantes !)
- Essorage très doux : réglez la vitesse d'essorage de la machine à laver à un minimum pour éviter les frottements inutiles entre le tissu et les balles dures.
- Séchez doucement : Séchage à l'air plutôt qu'au sèche-linge. En général, des couvertures Protac se séchent rapidement. Les couvertures ont donc une durée de vie plus longue et nous économisons de l'énergie.
- Il est recommandé d'aérer régulièrement les couvertures et les bien laisser à l'air.
– Voir également les instructions de lavage sur la couverture.

Couverture Protac Ball Blanket® Calm et Granulés

Couvertures de références n° 119-129, 301-302, 401-402 peuvent être divisée en deux ou trois et lavées dans un lave-linge classique d'une capacité minimale de 7 kg (programme doux/ un essorage très doux) avec une lessive sans agent de blanchiment.

Couverture Protac Ball Blanket® Flexible et Combi

Couvertures de références 201, 205, 202, 206 peuvent être lavées dans un lave-linge classique d'une capacité minimale de 7 kg (programme doux/ un essorage très doux) avec une lessive sans agent de blanchiment. Sortir les sacs de balles de la housse. Laver la housse et les sacs avec les balles séparément. Si vous avez un lave-linge d'une capacité minimale de 16 kg, vous pouvez laver la couverture complètement.

Protac Couverture Ball Blanket® et Classic

Couvertures de références n° 101, 102, 105, 106, 109, 110 peuvent être lavées dans un lave-linge d'une capacité minimale de 16 kg (programme doux/ un essorage très doux) avec une lessive sans agent de blanchiment.

Couverture Protac Ball Blanket® pour les petits enfants

Couvertures de références n° 107 peuvent être lavées dans un lave-linge classique d'une capacité minimale de 7 kg (programme doux/ un essorage très doux) avec une lessive sans agent de blanchiment.

Élimination des taches

Pour éliminer les taches avec un détachant, veuillez d'abord faire un test préalable à un endroit peu visible pour éviter d'éventuels dommages ou décolorations. Protac recommande de ne pas utiliser de détachant.

En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter.